


Liqui-PREP™

The Next Generation of Liquid Cytology

Technical Tips

Número : 00004

Fecha: 04/21/03

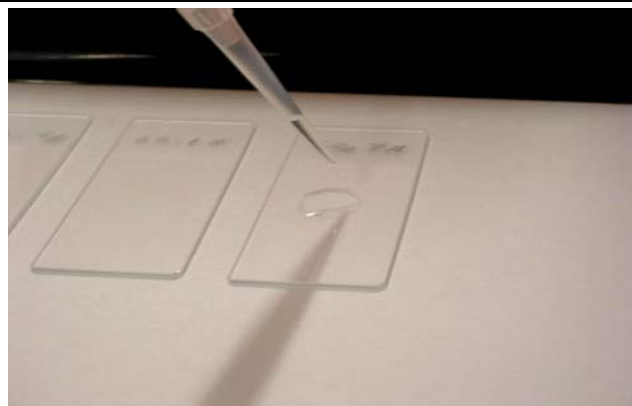

Asunto: Secado de láminas procesadas con **Liqui-PREP™** por medio de calor

Propósito de la recomendación técnica:

Esta recomendación es para aquellos usuarios de **Liqui-PREP™** que requieran secar las láminas más rápidamente antes de someterlas al proceso de tinción.

El tiempo de secado de láminas preparadas con **Liqui-PREP™** demora en la mayoría de los ambientes entre 45 minutos y una hora y media.

Recomendación técnica:

Luego de procesar las láminas, éstas pueden ser colocadas en un hormo común de laboratorio (o incubadora). La temperatura no debe sobrepasar los 50 grados C. A esta temperatura las láminas estarán secas en 15 a 25 minutos. Luego del secado las láminas estarán listas para la tinción.

En caso de dudas, por favor contacte a su representante local de Liqui-PREP o a LGM Internacional, Inc.

LGM International, Inc.
Fort Lauderdale, FL USA
Telephone: (954) 253-5671; Fax: (954) 584-2998
Email: techservices@lgmintl.com